



フェイス・シールド 装着方法

1


「フェイス・シールド」と
メガネを用意します。

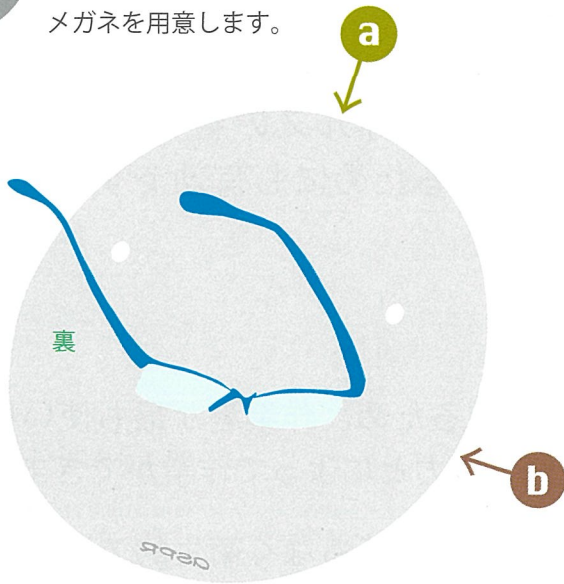

a

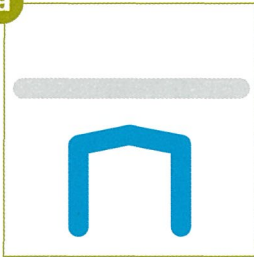


b

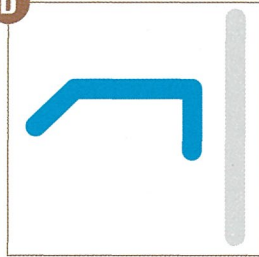


2


メガネを逆さにして、「フェイス・シールド」
の穴に両方の柄を同時に通します。

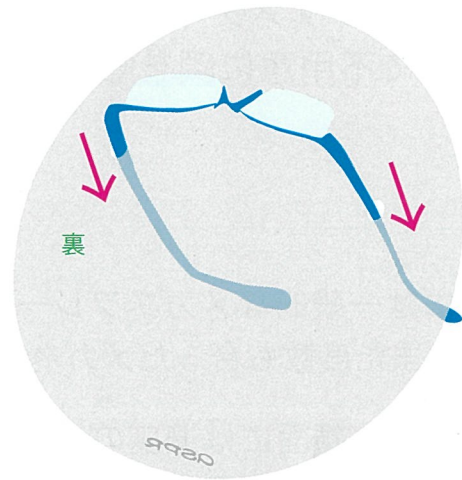

a

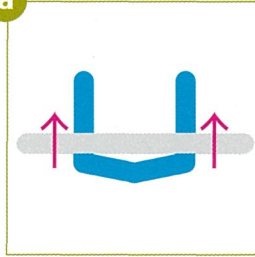

b

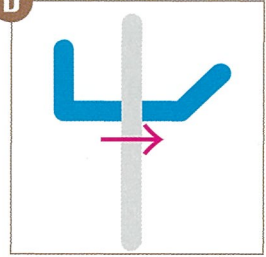


3


メガネを回転させます。



a

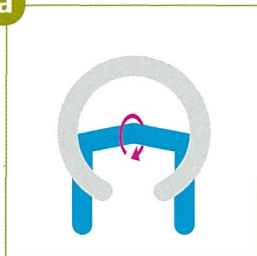


b

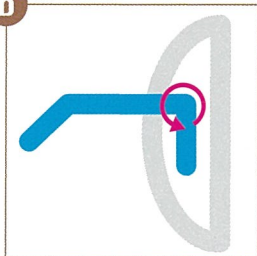

4

通常のメガネと同様に、耳にかけて装着
します。

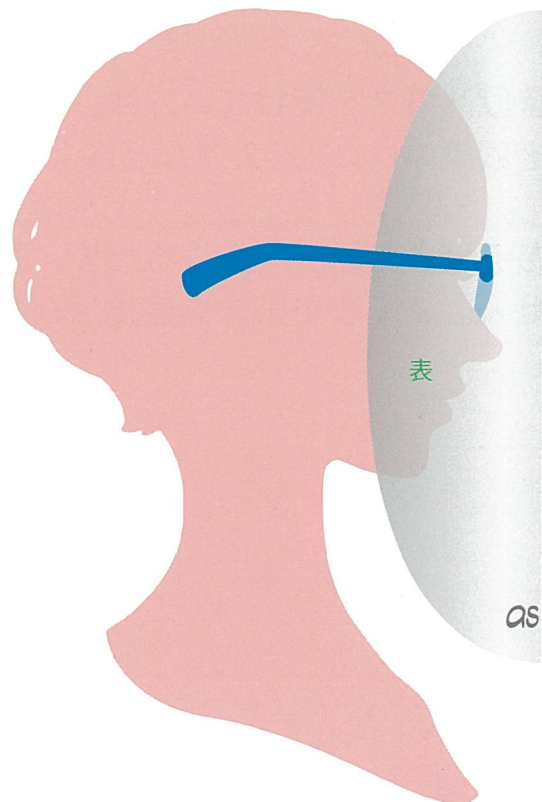

“フェイス・シールド” by ASPR

新型コロナウイルス診察の医療現場、PCR検査、感染者入院施設、隔離施設、歯科医、耳鼻科医などあらゆる医療現場で、感染者からの飛沫による感染を防ぐためのクリアタイプ・シールドです。ウイルスの着いた可能性のある手（手袋）で不用意に顔を触らないようにするためにも有効です。

特徴

- 1.装着には一般的なメガネフレームを使用するため、作業者が最も使い慣れていて、また度数も合ったメガネの装着感と視力とによって作業ができます。
- 2.シールドと顔面には適度の空間が開くため圧迫感もなく衛生的です。息苦しさはなく、呼吸による曇りも軽減されます。
- 3.透過性が高く、適度な硬度のあるPETフィルムを使用しています。水洗い、アルコール系の消毒液による変化も無く、繰り返しの使用が可能です。

使用注意点

- 1.メガネを耳にかける部分(テンプル、モダン)は外側に出るため、使用後は洗浄・消毒が必要となります。
- 2.普段メガネを使わない方は、度の付いていないファッションメガネ、安価な老眼鏡のレンズを外すなどによっての使用を推奨します。
- 3.ある程度の間隙が生じるため、感染を100%防ぐ事ができる製品ではありません。あくまで飛沫を直接浴びないための予防用としてご使用ください。

製造・販売

株式会社アサプア **ASPR**

〒324-0618

栃木県那須郡那珂川町小口 83-4

TEL : 0287-92-1600

FAX : 0287-92-1601

e-mail : info@asapura.jp

web : <http://www.asapura.jp>

フェイス・シールド固定方法

フェイスシールドにはメガネフレーム挿入ホール(2か所)があります。
このホールはメガネフレームの太さを考慮し多少大きめに作られているため次のことをお勧めします。

特に細いフレームのものはフェイスシールドが安定しないため下図のように角度を合わせてセロテープなどで固定します。

